M-NEB® VET INHALATIONSSET FÜR KLEINTIERE

Das M-neb® vet Inhalationsset wird zur Behandlung von Atemwegserkrankungen bei Kleintieren, wie z. B. kleinen Hunden, Katzen und auch Hasen, Igeln, Falken oder Reptilien eingesetzt. Es ermöglicht mithilfe der innovativen Mesh-Technologie eine gezielte und effektive Verabreichung verschiedenster Inhalationslösungen, die durch die Inhalation bis in die tiefstgelegenen Atemwegen Ihres Haustieres gelangen.

Das Set enthält neben dem Herzstück, der Steuer- und Mesh-Verneblereinheit, eine Inhalationsbox und eine kleine Inhalationsmaske. Entsprechend Ihrer **individuellen Bedürfnisse** kann so die am besten geeignete Applikationsart für Ihr Haustier gewählt werden.

Durch die nahezu **geräuschlose** und sehr angenehme Arbeitsweise ist das M-neb® vet Inhalationsset **auch für schreckhafte Tiere bestens geeignet.**

NEBU-TEC:

Innovative Inhalationssysteme für Mensch und Tier

NEBU-TEC ist ein führendes, international tätiges Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Elsenfeld (Deutschland). Wir entwickeln, produzieren und vertreiben mit rund 40 engagierten Mitarbeitenden moderne Inhalationssysteme auf Basis fortschrittlicher Mesh-Technologie. Die Inhalationssysteme finden Anwendung in der Human- und Veterinärmedizin. Die Produktion erfolgt zu 95 % in Deutschland - somit steht **NEBU-TEC** für höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

NEBU-TEC gilt als Pionier in der Veterinärmedizin und bietet spezialisierte Inhalationssysteme für die Behandlung von Pferden, Kleintieren wie Hunden und Katzen sowie Falken an.

- KONTAKT

Sie möchten Ihr Haustier mit einem effektiven Inhalationsgerät unterstützen? Kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail – wir beraten Sie gerne:



NEBU-TEC International med. Produkte Eike Kern GmbH

Kreuzfeldring 17 | D - 63820 Elsenfeld

+49 (0) 6022 - 610 62 -0 | info@nebu-tec.de www.nebu-tec.de

Besuchen Sie uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen:











outec NEBU-TEC



STRESSFREIE INHALATIONSTHERAPIE FÜR KLEINE HUNDE, KATZEN UND ANDERE KLEINTIERE



EINSATZ & VERWENDUNG DER INHALATION

Atemwegserkrankungen gehören in der Tiermedizin du den **meist diagnostizierten Erkrankungen**. Das M-neb® vet Inhalationsset kann für verschiedenste Kleintiere eingesetzt werden, so zum Beispiel ...

... für kleine Hunde

Die häufigste Atemwegserkrankung bei Hunden ist die **chronische Bronchitis**, die sich zumeist aus einer nicht (ausreichend) behandelten **akuten Bronchitis** entwickelt. Daneben finden sich bei Hunden normale Erkältungen wieder, aber auch der **Zwingerhusten**, **Lungenentzündungen oder allergisches Asthma** sind weit verbreitet.

... für andere Kleintiere

Auch andere Kleintiere, wie z. B. Hasen oder Igel, aber auch Falken leiden unter Atemwegserkrankungen, die eine inhalative Behandlung erforderlich machen können. Zudem sind respiratorische Symptome ein häufiger Vorstellungsgrund für Reptilien in den Tierarztpraxen.





... für Katzen

Bei Katzen treten Atemwegserkrankungen relativ häufig auf und können in jedem Alter vorkommen. Die Ursachen sind je nach Erkrankung unterschiedlich und reichen von einer Infektion mit **Bakterien** oder **Viren**, über **Allergien** und **Schadstoffbelastung** bis hin zu **schlechten Haltungsbedingungen**. Unter Katzenbesitzern bekannt ist der sogenannte **Katzenschnupfenkomplex**, aber auch Erkrankungen der unteren Atemwege, wie z. B. **Bronchitis**, **Lungenentzündungen** oder **felines Asthma**.


FUNKTIONSWEISE

Die je nach Tierart sowie den **individuellen Bedürfnissen** entsprechend gewählte Applikationsform wird durch die Verwendung des M-neb® vet mesh nebulizer ergänzt.

M-neb® vet: Smarte Vernebelung auf Knopfdruck

Die mit der Inhalationslösung befüllte, auslaufsichere Mesh-Verneblereinheit wird mittels des mitgelieferten Verbindungskabels entweder mit der Inhalationsbox oder der Inhalationsmaske sowie der M-neb® vet Steuereinheit verbunden. Die Steuereinheit wird vom Tierhalter bedient und verfügt über zwei Modi, intermittierend und kontinuierlich, die entsprechend der verwendeten Inhalationslösung ausgewählt werden können. Ist diese vollständig vernebelt, schaltet das Gerät automatisch ab.

Die M-neb® vet Mesh-Verneblereinheit produziert optimale Partikelgrößen zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege von Kleintieren. Dabei arbeitet das gesamte Inhalationssystem nahezu geräuschlos, sodass sich selbst ängstliche Haustiere schnell und unkompliziert an die Inhalationstherapie gewöhnen lassen.

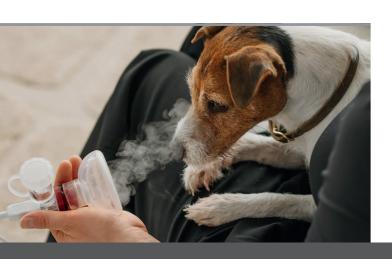

SO, WIE ES IHR HAUSTIER AM LIEBSTEN MAG ...

Das M-neb® vet Inhalationsset kann je nach Verhalten und Charakter des zu behandelnden Kleintiers

und so entsprechend der individuellen Bedürfnisse mit der Applikationsform Ihrer Wahl verwendet werden:

Inhalation über eine kleine Inhalationsmaske

Wenn Sie Ihrem Haustier durch Ihre Anwesenheit Sicherheit vermitteln, ist die kleine Inhalationsmaske für Sie bestens geeignet. Dabei können Sie Ihr Haustier z. B. im Arm oder auf dem Schoß halten. Sie steuern die Inhalationssitzung manuell und können so individuell auf den Atemrhythmus Ihrer Fellnase eingehen. Durch die Applikation direkt vor dem Maulbereich werden Augen und Haut geschont, sodass sich diese Methode für die Verabreichung von Medikamenten bewährt hat. Durch die direkte Einatmung werden auch Wirkstoffverluste vermieden.

Auch für schreckhafte Kleintiere

Geräuschlose und angenehme Arbeitsweise führt zu schneller Akzeptanz

Von Zuhause ohne großen Aufwand

Kinderleichte Anwendung sowie schnelle und hygienische Reinigung für eine langfristige und effektive Inhalationstherapie



(Strange

100 % Made in Germany

Wir suchen alle verwendeten Materialien mit viel Sorgfalt aus und verwenden nur bewährte und größtenteils biokompatible Stoffe aus der Humanmedizin, die wir für unsere Qualitätsprodukte von deutschen Lieferanten beziehen

Inhalation in der praktischen Inhalationsbox

Die Inhalationsbox eignet sich für all jene Haustiere, die neuen Situationen skeptisch gegenüberstehen und sich ungern halten lassen. Ihr Haustier sitzt während der gesamten Inhalationstherapie entspannt in der Inhalationsbox und atmet das Aerosol, das sich in der Inhalationsbox sammelt, ein. Weil bei dieser Methode nicht nur die Atemwege behandelt werden können, sondern durch die Raumverneblung auch das größte Atmungsorgan - die Hautmit atmet, eignet sich diese Applikationsform vornehmlich für die Verneblung von Salzlösungen.

Präzise und genau

Inhalation über zwei verschiedene Modi mit Fokus auf den Atemrhythmus Ihres Haustieres zur Erzielung bester Erfolge

Viele Präparate vernebelbar

Alle gängigen Inhalationslösungen sind ohne Erhitzung und damit einhergehender Zerstörung verwendbar

— TECHNISCHE DATEN

Das M-neb® vet Inhalationsset für kleine Hunde, Katzen und andere Kleintiere ist ausgestattet mit **modernster Technik, die** Sie begeistern wird:



L550 x B360 x H330 mm, 2.350 g Netto-Gesamtgewicht (in betriebsbereitem Zustand)



MMD: > 4 μm | FPF: < 50 % Output: 0,25 -0,75 ml pro Minute (im kontinuierlichen Modus)



Intermittierender & kontinuierlicher Modus Automatische Abschaltfunktion Integrierte Ladestandanzeige

